


Comment effectuer le test diagnostique rapide de la trypanosomiase humaine africaine (THA)

Modifié à des fins de formation à l'utilisation du test **SD BIOLINE HAT**
Uniquement à usage de recherche



Rassemblez :

- Un NOUVEAU sachet de test non ouvert
- Une NOUVELLE pipette jetable
- Un NOUVEAU tampon imprégné d'alcool non ouvert
- Une NOUVELLE lancette non ouverte
- Une NOUVELLE paire de gants jetables
- Une solution tampon
- Une montre ou un chronomètre
- Une poubelle pour objets tranchants
- Un crayon ou un stylo

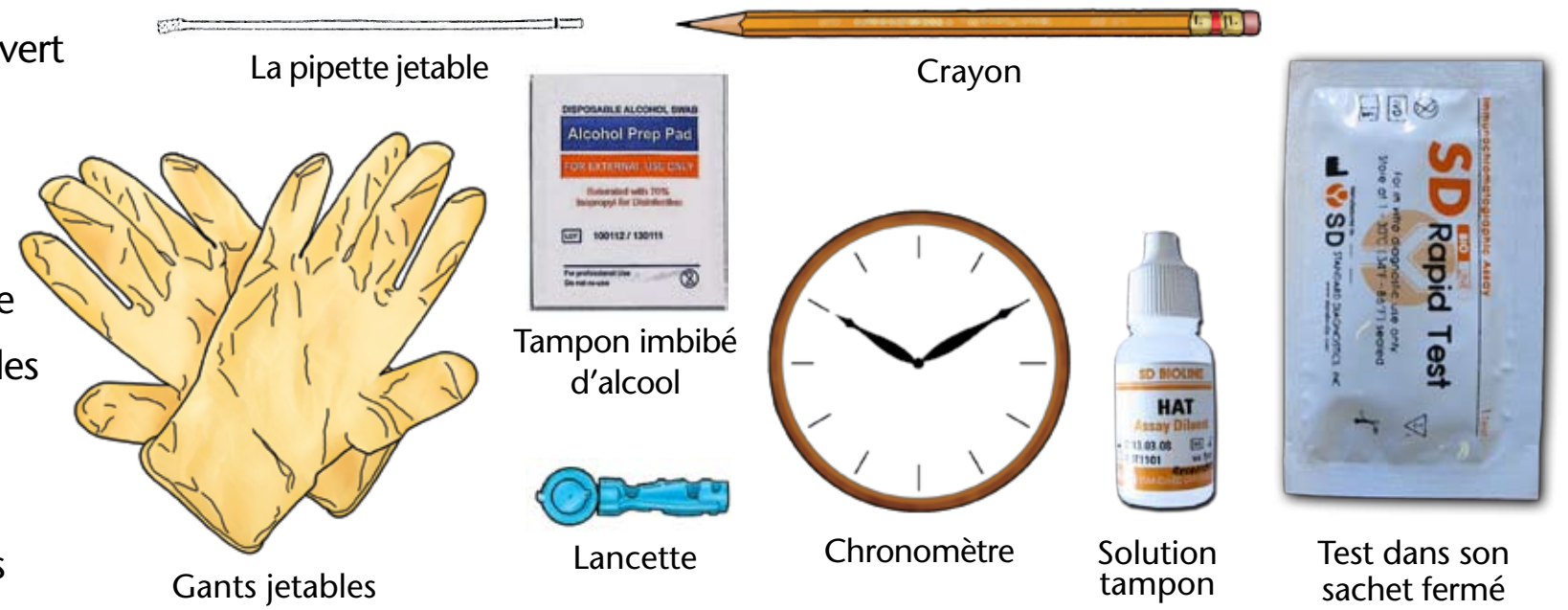

LISEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER

- 1.** Vérifiez la date de péremption sur le sachet du test.



Date de péremption

- 2.** Enfilez les gants. Enfilez une nouvelle paire de gants pour chaque patient.



- 3.** Ouvrez le sachet du test et retirez :



a. Le test




b. Le dessiccant


- 4.** Inscrivez le nom du patient sur le test.



- 5.** Prenez fermement le 4ème doigt de la main gauche du patient. Désinfectez le doigt au moyen du tampon imprégné d'alcool. Laissez sécher le doigt avant de piquer.

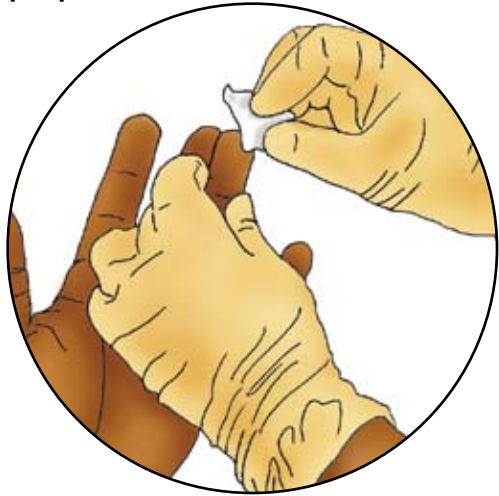


- 6.** Sortez la lancette de son sachet. Piquez le doigt du patient pour obtenir une goutte de sang.

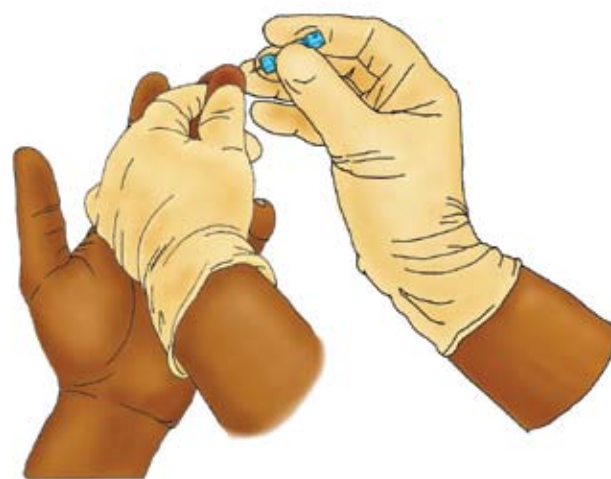


- 7.** Jetez la lancette dans la poubelle pour objets tranchants immédiatement après avoir piqué le doigt. **Ne posez pas la lancette avant de la jeter.**



- 8.** Pressez doucement la base de la pipette jetable et touchez avec son extrémité la goutte de sang. Relâchez doucement la pression sur la pipette afin de recueillir le sang jusqu'à la marque noire indiquée.

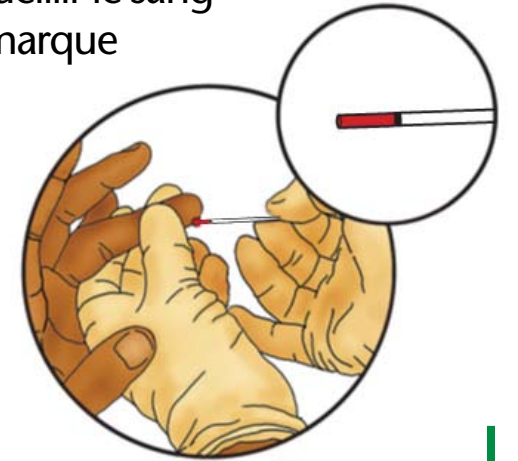


- 9.** Avec l'extrémité de la pipette jetable, touchez le fond de l'alvéole ronde. Pressez doucement la pipette pour déposer le sang.

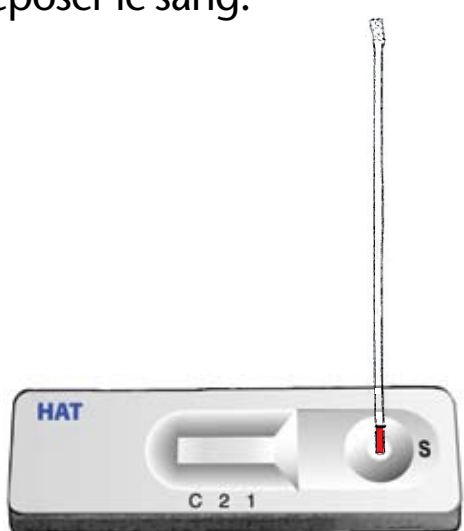

- 10.** Jetez la pipette dans la poubelle pour objets tranchants.



- 11.** Ajoutez quatre (4) gouttes de solution tampon dans l'alvéole ronde.

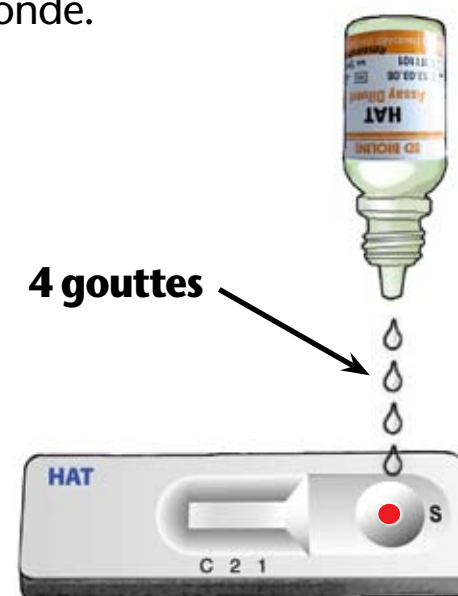

- 12.** Attendez **15 minutes** après avoir ajouté la solution tampon.




- 13.** Lisez le résultat du test. (REMARQUE : Pour lire le test, vous devez attendre **15 minutes** après avoir ajouté la solution tampon. Sinon, vous risquez d'obtenir un FAUX résultat).

- 14.** Comment lire le résultat du test :

POSITIF

Une ligne visible dans la fenêtre « C » ET UNE ou DEUX lignes visibles dans la fenêtre « 1 » et/ou « 2 » signifient que le patient EST SUSPECT POUR LA THA (présence d'anticorps dirigés contre les antigènes de la THA). Le test est positif même si les lignes sont faibles.

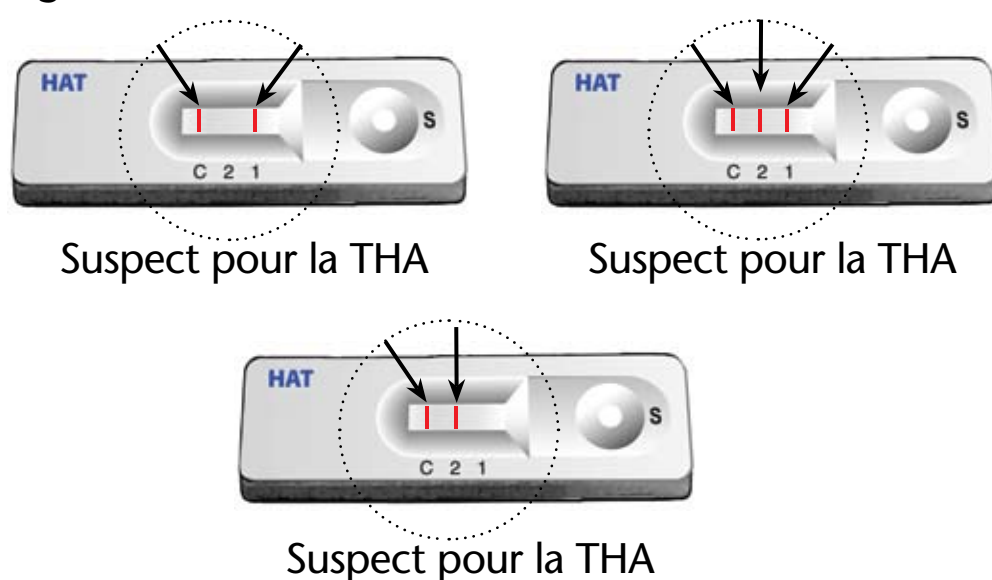


Suspect pour la THA

Suspect pour la THA

Suspect pour la THA

NEGATIF


Une ligne visible dans la fenêtre « C » et PAS DE LIGNE visible dans les fenêtres « 1 » et « 2 » signifient que le patient N'EST PAS ATTEINT de THA.

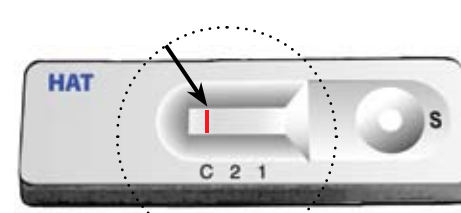

Négatif

RESULTAT INVALIDE

Pas de ligne dans la fenêtre « C » et une ou aucune ligne dans la fenêtre « 1 » ou dans la fenêtre « 2 » signifient que le test est invalide.

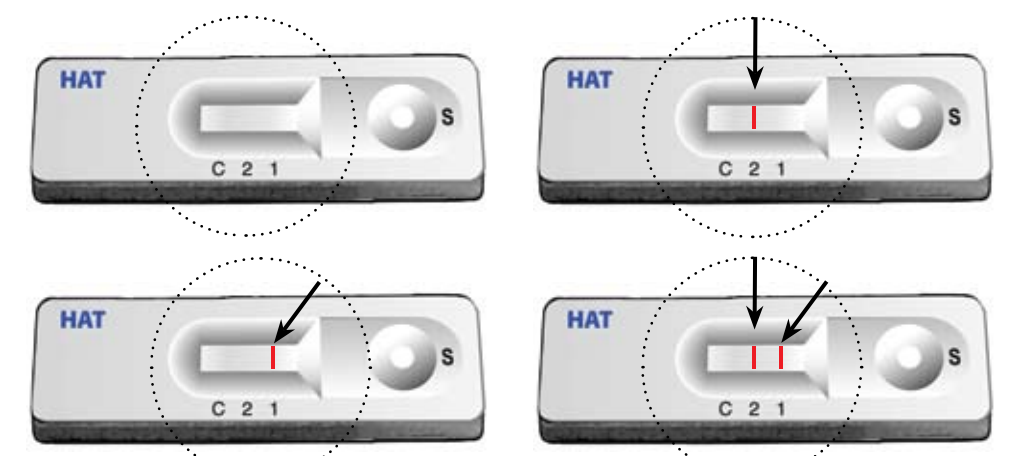

Si aucune ligne n'apparaît dans la fenêtre « C », recommencez le test en utilisant un **NOUVEAU test dans son sachet fermé** et une **NOUVELLE lancette**.

- 15.** Jetez les gants*, le tampon imbibé d'alcool, le dessiccant et l'emballage dans une poubelle normale – pas dans la poubelle pour objets tranchants.



* En situation de dépistage actif, suivez les recommandations du programme national.

- 16.** Inscrivez le résultat du test dans votre registre. Jetez la cassette dans une poubelle normale.



REMARQUE : Chaque test ne peut être utilisé **QU'UNE SEULE FOIS**. N'essayez pas d'utiliser le test plus d'une fois.



Ce document est basé sur l'adaptation de matériel de formation générique préexistant pour le paludisme réalisé par FIND, URC, Zambia NMCP et Malaria Consortium.

Préparé le 30 Juin 2011, V1.0. Les instructions de préparation du test pouvant être modifiées par le fabricant, tous les détails doivent être vérifiés vis-à-vis des instructions décrites dans l'encart du produit distribué par le fabricant.