


Comment effectuer le test diagnostique rapide du paludisme

Modifié aux fins de formation à l'utilisation du **test générique** de détection de *P. falciparum* pour diagnostiquer le paludisme à *P. falciparum*




Rassemblez :

- Un **NOUVEAU** sachet de test **non ouvert**
- Un **NOUVEAU** tampon imbibé d'alcool **non ouvert**
- Une **NOUVELLE** lancette **non ouverte**
- Une **NOUVELLE** paire de gants à jeter
- Une solution tampon
- Une montre ou un minuteur

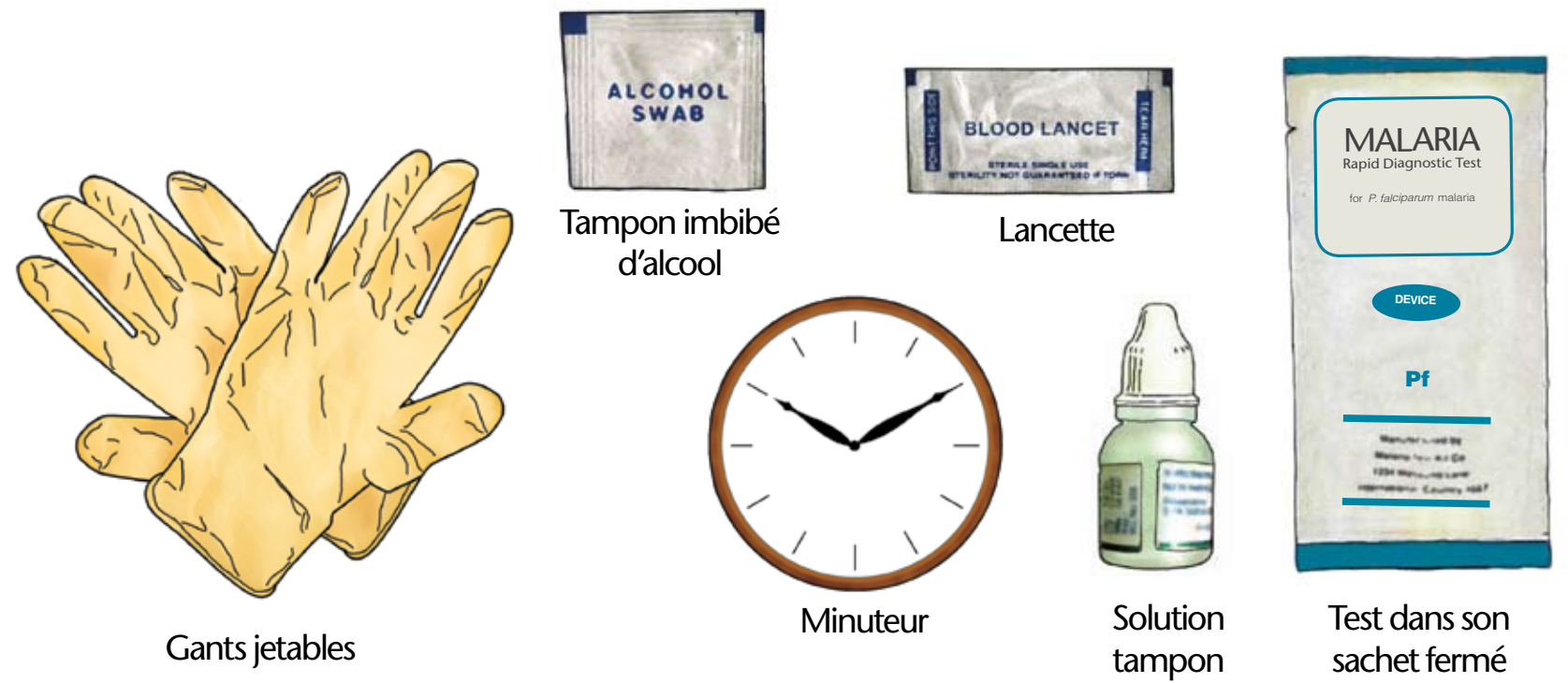

LISEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER

- Vérifiez la date de péremption sur le sachet du test.

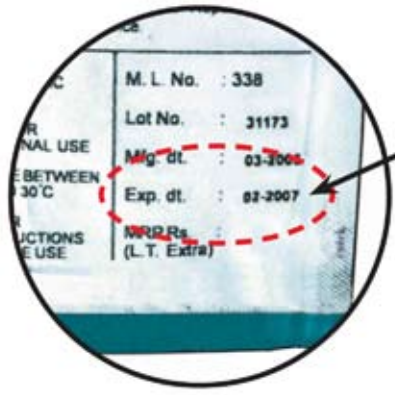


Date de péremption

- Enfilez les gants. Enfilez une nouvelle paire de gants pour chaque patient.



- Ouvrez le sachet du test et retirez :
 - Le test
 - Le tube capillaire
 - Le dessicatif

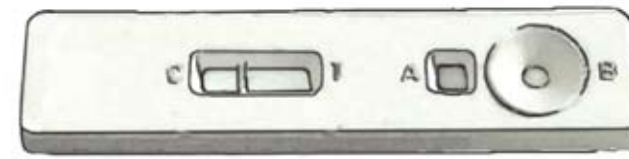

a. Le test

b. Le tube capillaire

c. Le dessicatif


- Inscrivez le nom du patient sur le test.



- Prenez fermement le 4e doigt de la main gauche du patient. Désinfectez le doigt au moyen du tampon imbibé d'alcool. Laissez sécher le doigt avant de piquer.




- Sortez la lancette de son sachet. Piquez le doigt du patient pour obtenir une goutte de sang.

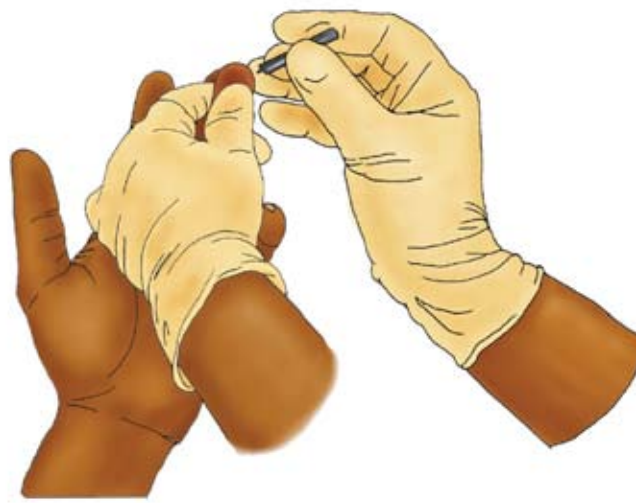


- Jetez la lancette dans la boîte à aiguilles immédiatement après avoir piqué le doigt. **Ne posez pas la lancette avant de la jeter.**



- Utilisez le tube capillaire pour recueillir la goutte de sang.

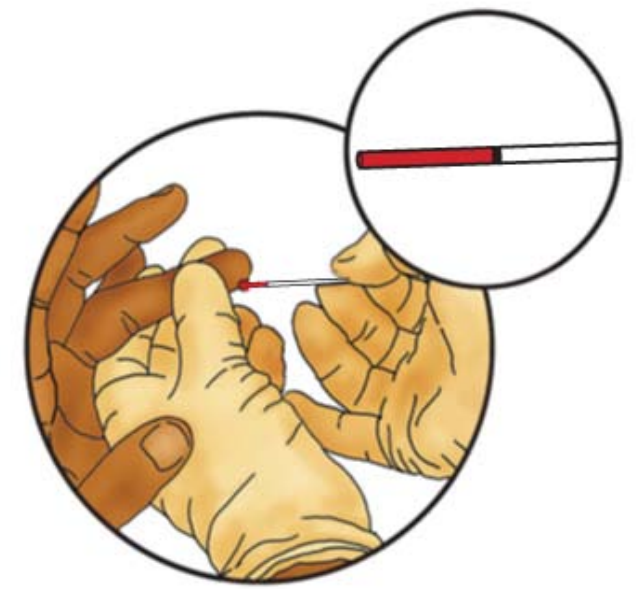

- Utilisez le tube capillaire pour mettre la goutte de sang dans l'alvéole carrée marquée « A ».

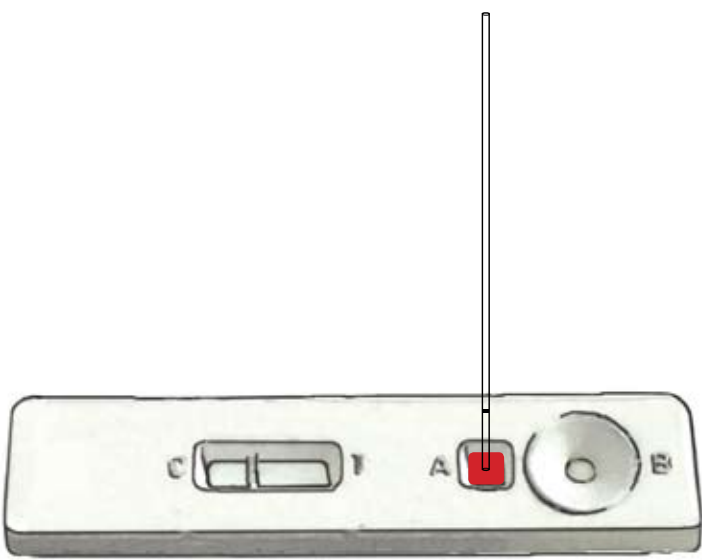

- Jetez le tube capillaire dans la boîte à aiguilles.



- Ajoutez la solution tampon dans l'alvéole ronde marquée « B ».



Comptez le nombre exact de gouttes

- Attendez **15 minutes** après avoir ajouté la solution tampon.




- Lisez les résultats du test. (REMARQUE : Pour lire le test, vous devez attendre **15 minutes** après avoir ajouté la solution tampon. Sinon, vous risquez d'obtenir de FAUX résultats.)

- Comment lire les résultats du test :


POSITIF

Une ligne rouge dans la fenêtre « C » ET une ligne rouge dans la fenêtre « T » signifient que le patient EST EFFECTIVEMENT ATTEINT du paludisme à *P. falciparum*.

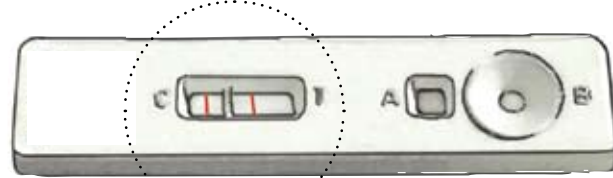

P. falciparum


Le test est POSITIF même si la ligne rouge dans la fenêtre « T » est peu visible.

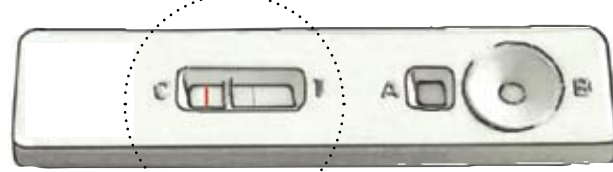

P. falciparum (peu visible +)

NEGATIF



Une ligne rouge dans la fenêtre « C » et PAS DE LIGNE dans la fenêtre « T » signifient que le patient N'EST PAS ATTEINT de paludisme à *P. falciparum*.

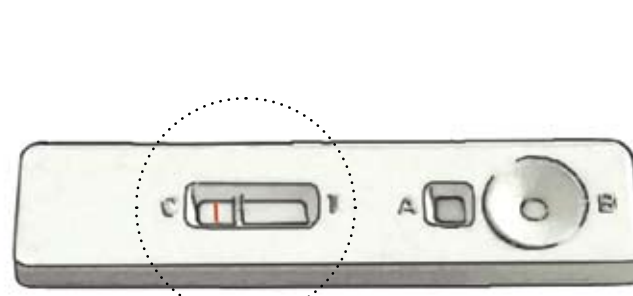

Négatif

RESULTAT INVALIDE

PAS DE LIGNE dans la fenêtre « C » et une ou aucune ligne dans la fenêtre « T » signifient que le test est invalide.

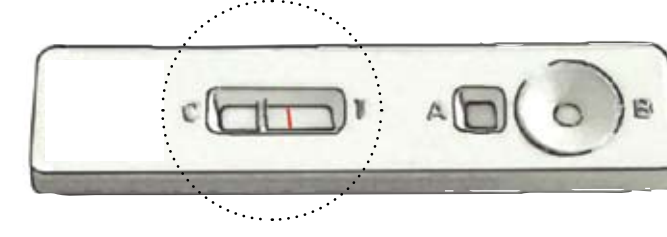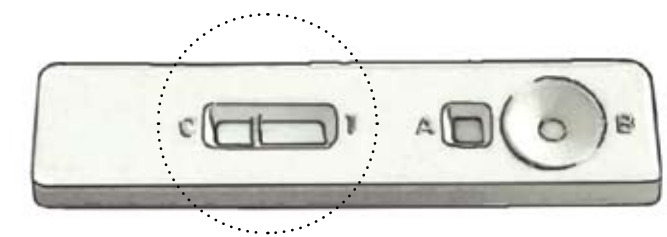

Recommencez le test avec un nouveau matériel si aucune ligne de contrôle n'apparaît.

Si aucune ligne n'apparaît dans la fenêtre « C », recommencez le test en utilisant un **NOUVEAU test dans son sachet fermé** et une **NOUVELLE lancette dans son sachet fermé**.

- Jetez les gants, le tampon imbibé d'alcool, le dessicatif et l'emballage dans une poubelle normale – pas dans une boîte à aiguilles.



- Inscrivez les résultats du test sur votre registre d'agents de santé communautaires. Jetez la cassette dans une poubelle normale.



REMARQUE : Chaque test ne peut être utilisé **QU'UNE SEULE FOIS**. N'essayez pas d'employer le test plus d'une fois.

